



## INSTRUÇÕES PARA COLHEITA, FILTRAGEM E ENVIO DA AMOSTRA.

Conteúdo do kit de filtragem de urina UROMONITOR®:

1. 1 copo descartável
2. 1 filtro
3. 1 seringa 10 mL
4. 1 saco de plástico de fecho hermético
5. 2 tampas para filtros

### 1. COLHEITA:

1.1 Colha a urina para o frasco de colheita.

Proceda de imediato com a filtragem da amostra ou guarde o frasco a 4°C até ao momento de filtragem (por um período máximo de 4 horas) de modo a preservar a qualidade da amostra e evitar contaminações.

### 2. FILTRAGEM:

2.1 Recolha uma amostra de 10 mL de urina do frasco de colheita usando a seringa (Figura 2.1).

2.2 Enrosque o filtro na extremidade da seringa. (Figura 2.2)

2.3 Empurre o embolo da seringa, de forma a fazer passar todo o volume de urina através do filtro para um contentor de descarte (não fornecido) (Figura 2.3).

2.4 Desenrosque a seringa do filtro.

2.5 Tape as extremidades do filtro com as tampas fornecidas.

2.6 Coloque apenas o filtro selado com as tampas no saco hermético (Figura 2.4).

2.8 Proceda ao envio no mesmo dia que efetuou a colheita e filtragem.



### 3. ENTREGA

Entregue a amostra num Posto do Grupo Germano de Sousa, com a requisição médica do teste.